

一次性使用无菌吸唾管使用说明书

【产品名称】一次性使用无菌吸唾管

【产品型号及规格】一次性使用无菌吸唾管型号规格：尺寸见表 1

表 1

单位：mm

型号规格	总长	管体长度L	管体外径	管体内径
RF/Saliva Ejector —A	160~180	135~155	6.0~7.0	4.5~5.5
RF/Saliva Ejector —B	140~160	135~155		

【产品主要性能】一次性使用无菌吸唾管塑化均匀，管壁内不含杂质；表面应光滑，吸唾头应无毛刺，折弯无死角、过水通畅；金属丝应光亮、无锈斑，塑形过程中不损伤软管。

【结构组成】本产品由吸唾头、软管、金属丝组成；按吸唾头形状分为：尖头型、平头型。其中吸唾头和软管均采用聚氯乙烯材料制成，金属丝材质为镀铜焊丝。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌，一次性使用。

【适用范围】配合治疗机抽吸装置使用，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物。

【禁忌症】无已知禁忌症

【注意事项、警示及提示性说明】

1. 本品仅供一次性使用，包装破损禁止使用；
2. 本产品仅供单个病人一次性使用，有效期为二年；
3. 本品仅供专业人员使用，使用前应仔细阅读使用说明书；
4. 本品用后应按医院或环保部门要求处置废弃物；
5. 出现分泌物堵塞一次性使用无菌吸唾管时，应将一次性使用无菌吸唾管取下清理或更换一次性使用无菌吸唾管。

【灭菌方法】一次性使用无菌吸唾管经环氧乙烷灭菌，产品中环氧乙烷的残留量 $\leq 10\mu\text{g/g}$ 。

【使用说明】

1. 撕开一次性使用无菌吸唾管小包装，取出一一次性使用无菌吸唾管；

2. 与口腔综合治疗椅弱吸唾器接口连接；
3. 调节负压强度至规定参数进行吸引操作。

【贮存】本产品应贮存于相对湿度不超过 80%，无腐蚀性气体，避光、干燥、通风、清洁的环境内。

【运输方式】本产品在运输时应防止重压、阳光直晒和雨雪浸淋。

【生产日期、使用期限】：见产品包装。

【标签所用的图形、符号的解释】

符号	说明	符号	说明
	采用环氧乙烷灭菌		使用前仔细阅读说明书
	一次性使用，禁止二次使用		避免日晒
	包装破损，禁止使用		避免雨淋
	小心轻放	/	/

产品技术要求编号：鄂械注准 20202172975

医疗器械注册证编号：鄂械注准 20202172975

生产许可证编号：鄂食药监械生产许 20190846 号

注册人/生产企业/售后服务单位：宜昌人福药业有限责任公司

注册人/生产企业住所：湖北省宜昌开发区大连路 19 号*

生产地址：湖北省宜昌开发区大连路 19 号（东山园区）9 号楼

联系方式：电话：0717-6334504 传真：0717-6345080

邮编：443005